



FUTURO™ SUPORTE ARTICULADO PARA JOELHO

48579



Estabilizadores laterais duplos articulados para um suporte rígido após lesão.

IDEAL PARA:

Proporciona suporte para lesões comuns, como entorses e distensões, suporte médio e lateral

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 As tiras de aperto fornecem um suporte ajustável e um ajuste personalizado.
- 2 Amortecimento da rótula para estabilidade e proteção.
- 3 A mistura resistente de neopreno proporciona um suporte robusto e um calor e conforto relaxantes.
- 4 Costuras macias e maior comprimento para mais conforto.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
6174920	40.6-55.9



Finalidade: Ajuda a proporcionar suporte a joelhos rígidos, frágeis ou lesionados.

CUIDADO: Algumas pessoas podem ser sensíveis ao neopreno ou à borracha neopreno. Se se desenvolver irritação da pele, interrompa a utilização e consulte um médico.

Composição: Alumínio, Neopreno, Nylon, Polypropylene, POM, EVA.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

COMO UTILIZAR:



Dianteira

Solte as faixas anteriores; abra as faixas e os fechos posteriores. Posicione a extremidade mais larga da braçadeira ao longo da coxa com o anel patelar sobre a rótula. Fixe o fecho inferior da braçadeira por baixo da parte de trás do joelho e, sem seguida, fixe o fecho superior.



Traseira

Fixe as faixas de aperto fazendo-as passar pelas argolas e ajuste para suporte adicional. Ajuste todos os fechos até sentir firmeza e conforto.



Traseira



Dianteira

Certifique-se de que as dobradiças laterais se mantêm ao longo da linha média de cada lado da perna pela utilização do sistema de tiras.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ª
1990-138 Lisboa

