



FUTURO™ SUPPORTO FERMO PER GINOCCHIO

48579



Stabilizzatori laterali doppi articolati per un supporto rigido in situazione di post-trauma.

IDEALE PER:

Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni e contratture, supporto mediale/laterale

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- ① Cinghie a pressione per un supporto regolabile e un adattamento personalizzato.
- ② Imbottitura sulla rotula per stabilità e protezione.
- ③ La miscela di neoprene durevole offre un supporto forte, calore e comfort.
- ④ Bordi morbidi e maggiore lunghezza per un comfort migliore.

TAGLIA:

Codice Prodotto	CM
48579	40.6-55.9



COME INDOSSARLO:



Fronte

Allentare le fasce anteriori, aprire le fasce posteriori e le chiusure. Posizionare il bordo più largo della ginocchiera sulla coscia e l'anello della patella in corrispondenza della rotula. Fissare la chiusura inferiore della ginocchiera al di sotto della parte posteriore del ginocchio, quindi fissare la chiusura superiore.




Retro

Avvolgere le fasce posteriori facendole passare nelle fibbie e stringere per ottenere un maggiore sostegno. Regolare tutte le chiusure per ottenere una vestibilità salda, ma comoda.



Retro

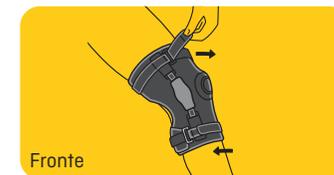

Fronte

Accertarsi che le articolazioni laterali restino lungo la linea mediana dei due lati della gamba, regolando il sistema a fasce.

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

ATTENZIONE: Alcune persone possono essere sensibili al neoprene o alla gomma in miscela di neoprene. In caso di arrossamento interrompere l'uso e consultare un medico.

Composizione: Aluminium, Neoprene, Nylon, Polypropylene, POM, EVA.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pogliano MI
www.3mitalia.it/futuro

