



FUTURO™

KNIE-BANDAGE MIT SEITLICHER GELENKSCIENE

48579DABI

**HOHER
STÜTZGRAD**



Beidseitig tragbare laterale Stabilisatoren für optimale Unterstützung nach einer Verletzung.

IDEAL FÜR:

Unterstützung bei den am häufigsten auftretenden Verletzungen wie Verstauchungen und Zerrungen

EIGENSCHAFTEN:

- ① Befestigungsriemen bieten anpassbare Unterstützung und passgenauen Sitz.
- ② Polsterung der Knie Scheibe für Stabilität und Schutz.
- ③ Strapazierfähiges Neoprenmaterial sorgt für starken Halt, schmerzlindernde Wärme und Komfort.
- ④ Glatte Kanten und größere Länge für mehr Tragekomfort.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
48579DABI	15783309	40.6-55.9




TRAGEANWEISUNG:



Lösen Sie die Bänder vorn und öffnen Sie die Bänder hinten sowie die Verschlüsse. Legen Sie die Bandage mit dem breiten Ende zum Oberschenkel und dem Patellaring über der Knie Scheibe auf. Schließen Sie die Bandage an der Rückseite zuerst unten, dann oben.



Führen Sie die Gurtbänder zur zusätzlichen Stabilisierung durch die Schnallen. Stellen Sie alle Schließen so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

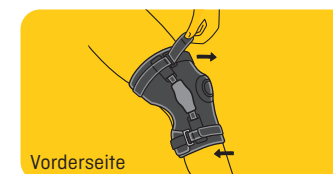

Achten Sie beim Spannen der Gurtbänder darauf, dass die Verschlüsse jeweils seitlich in der Mittellinie des Beins bleiben.

3M Deutschland GmbH, Consumer Health Care
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
www.futuro.de



Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neopren-Gummimischungen. Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Zusammensetzung: Aluminium, Neoprene, Nylon, Polypropylene, POM, EVA.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.