



# FUTURO™ GENOUILLÈRE AVEC CHARNIÈRE

48579



**Renforts latéraux à double pivotement pour un soutien rigide après une blessure.**

## INDIQUÉ POUR:

Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses et les foulures, support médial/latéral

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Les sangles de fixation fournissent un soutien réglable et un ajustement personnalisable.
- 2 Amortissement du genou pour protection et stabilité.
- 3 Mélange de néoprène durable pour soutien ferme, chaleur et confort.
- 4 Bords lisses et longueur étendue pour plus de confort.

## TAILLES:

Category Number	cm
48579	40.6-55.9



3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour  
le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

## MODE D'EMPLOI:



Avant

Desserrez les sangles avant, puis ouvrez les fermetures et les sangles arrière. Placez le bord le plus large de l'orthèse le long de la cuisse tout en positionnant l'anneau de la rotule au-dessus de la rotule. Fixez la fermeture inférieure de l'orthèse sous l'arrière du genou, puis fermez la fermeture supérieure.




Arrière

Placez les sangles de fixation au travers des boucles et serrez-les pour renforcer le support. Réglez toutes les fermetures jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



Back

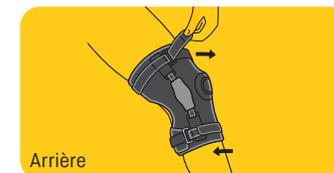

Arrière

Assurez-vous que les charnières latérales restent le long de la ligne médiane de chaque côté de la jambe en utilisant le système d'attache.

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

**AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc.**

**En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.**

Composition: Aluminium, Neoprene, Nylon, Polypropylène, POM, EVA.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

