



FUTURO™ SCHARNIERENDE KNEIBRACE

48579



Dubbel scharnierende zijstabilisators voor stevige steun na letsel.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures zoals verstuiking en overbelasting. Mediale/laterale steun.

HOOFDKENMERKEN:

- 1 De aanspanbare riempjes zorgen voor ondersteuning op maat en een goede pasvorm.
- 2 Bescherming en stabiliteit voor de knieschijf.
- 3 Duurzame neopreenmix biedt een sterke ondersteuning, warmte en comfort.
- 4 Gladde randen en langere lengte voor extra comfort.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
48579	2716082	40.6-55.9



DRAAGINSTRUCTIES:



Voorzijde

Maak de riemen aan de voorkant los; open de riemen en sluitingen aan de achterkant. Plaats de breedste rand van de brace rond de dij terwijl de knieschijf over de knieschijf wordt gepositioneerd. Maak de onderste sluiting van de brace vast onder de achterkant van de knie en maak vervolgens de bovenste vast.




Achterzijde

Steek de aanspanbare riemen terug door de gespen en trek ze aan voor extra steun. Verstel alle sluitingen totdat de brace strak maar comfortabel zit.



Achterzijde

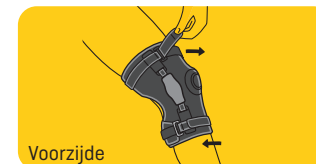

Voorzijde

Zorg ervoor dat de zijscharnieren aan beide kanten langs de middenlijn van het been blijven zitten door middel van het riemensysteem.

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

LET OP: Sommige mensen zijn gevoelig voor neopreen of neopreen-rubbermengsels. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er uitslag ontstaat.

Samenstelling: Aluminium, Neopreen, Nylon, Polypropyleen, POM, EVA.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

