



FUTURO™

THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS FUSSGEWÖLBE

48510EUI



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Zur Unterstützung von Fuß, Fußgewölbe und Ferse.

Zusammensetzung: Thermoplastisches Elastomer, Polypropylen, Nylon, Polyester, Polyurethan, Spandex.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

Unterstützt die Füße bei Symptomen
der Plantarfasziitis.

IDEAL FÜR:

Die tägliche Unterstützung in Sport und Alltag

EIGENSCHAFTEN:

- ① Zwei austauschbare Einlagen bieten
passgenaue Unterstützung.
- Flaches Profil – kann mit oder ohne Socken
und/oder Schuhe getragen werden.
- Bietet Kompression, Unterstützung
und Polsterung.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	CM
48510EUI	7406923	21.6-30.5

Kann angepasst werden.
Eine Bandage für jeden Fuß.
Messen Sie den Spannumfang.




TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie den Klettstreifen und legen Sie die
Bandage so an, dass sie bequem unter dem
Fußgewölbe sitzt (die Fußsymbole sollten dabei
auf die Innenseite des Fußgewölbes zeigen).



Befestigen Sie die Bandage mit der Hakenschleufe
auf der Oberseite des Fußes. Ziehen Sie die Bandage
mit der Hakenschleufe über das Fußgewölbe.

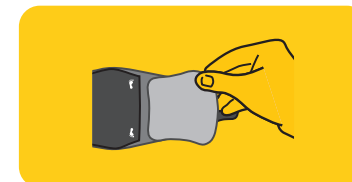

Richten Sie das Fußsymbol auf dem Riemen
am Fußsymbol der Einlage aus.

Es wird empfohlen, die Bandagen am ersten Tag
4 Stunden zu tragen und die Tragedauer danach täglich
um 1 bis 2 Stunden zu erhöhen. Wenn Sie nach einer
Woche das Gefühl haben, mehr Unterstützung zu
benötigen, wechseln Sie zu der dunkelblauen Einlage
und steigern Sie die Tragedauer wieder schrittweise
von Tag zu Tag. Die Bandagen sollten an beiden Füßen
getragen werden, um eine korrekte Körperhaltung
sicherzustellen.



3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro