



FUTURO™ TERAPEUTISKT FOTVALVSSTÖD

48510



Stöd och hjälp för fötter med symtom av plantar fasciit.

PERFEKT FÖR:

Perfekt stöd under dagen – när du tränar och under vardagsaktiviteter.

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Två flyttbara hålfotsinlägg för anpassat stöd.
- Tunn profil – kan bäras med eller utan strumpor och/eller skor.
- Ger kompression, stöd och dämpning.

STORLEK:

Artikel Nummer	CM
48510	21.6-30.5



Justera för anpassad storlek.
Ett stöd för varje fot.
Mät omkretsen runt vristen.



VENTILERANDE
MATERIAL


Avsedd användning: För stöd åt fot, fotvalv och häl.

Material: Termoplastisk elastomer, Polypropen, Nylon, Polyester, Polyuretan, Spandex.
Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.


ANVÄNDNING:



Lösa kardborrebandet och placera stödet så att det vilar bekvämt under fotvalvet (fotsymbolerna ska vara placerade mot insidan av valvet).

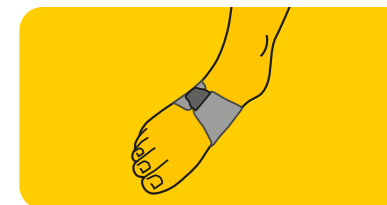

Fäst kardborrebandet på fotens ovasida. Dra åt så att inlägget sitter stadigt på plats.

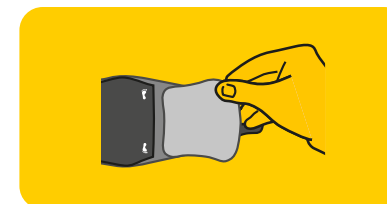

Matcha fotsymbolen på remmen mot fotsymbolen på inlägget.

Vi rekommenderar att du bär remmarna med inlägg 4 timmar den första dagen och sedan ökar användningen med 1-2 timmar per dag. Om du upplever att du behöver mer stöd efter 1 vecka byter du till det mörkblå inlägget och upprepar den rekommenderade gradvisa användningstiden. Remmarna med inlägg bör bäras på båda fötterna för att undvika snedbelastning.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

3M