



# FUTURO™ SOPORTE TERAPÉUTICO PARA ARCO PLANTAR

48510

 **SOPORTE MODERADO**

**Diseñado para dar apoyo al pie para tratar los síntomas de fascitis plantar.**

## IDEAL PARA:

Ideal para utilizar durante actividades diarias o deportivas.

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dos plantillas extraíbles proporcionan el soporte necesario.
- Perfil fino, pueden utilizarse con o sin calcetines o zapatos.
- Proporcionan compresión, soporte y amortiguación.

## TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
189733.6	21.6-30.5

Ajustable.  
Un soporte para cada pie.  
Medir la circunferencia del empeine.




## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abrir la correa y colocar el soporte de modo que descansa cómodamente bajo el arco del pie (los iconos del pie deben colocarse contra la parte interior del arco).



Sujetar en la parte superior del pie con el enganche. Utilizar el enganche para tirar el arco plantar hacia arriba.

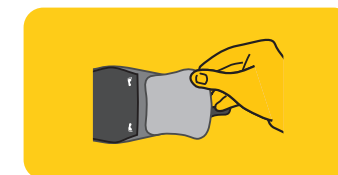

El símbolo del pie de la correa debe coincidir con el símbolo del pie de la plantilla.

Se recomienda utilizar las bandas durante 4 horas el primer día e ir incrementando gradualmente 1-2 horas al día. Transcurrida una semana, si se necesita un mayor soporte, cambiar la plantilla por la de color azul oscuro y volver a seguir el proceso de utilización gradual. Deben utilizarse las bandas en ambos pies para garantizar una correcta alineación corporal.



**MATERIAL TRANSPIRABLE**

Uso previsto: Sujeción del pie, arco plantar y talón.

Composición: Thermoplastic Elastomer, Polypropylene, Nylon, Polyester, Polyurethane, Spandex.  
Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.  
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

