



# FUTURO™ SUPORTE TERAPÊUTICO PARA O ARCO PLANTAR

48510



Desenhado para dar apoio ao pé para tratar os sintomas da fasciitis plantar.

## IDEAL PARA:

Ideais para suporte diurno, durante as atividades atléticas e diárias

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Duas inserções de arco amovíveis proporcionam suporte personalizado.
- Perfil fino - pode ser utilizado com ou sem meias e/ou sapatos.
- Oferece compressão, suporte e amortecimento.

## TAMANHOS:

C.N.P	CM
6274134	21.6-30.5

Ajuste ao tamanho.  
Um suporte para cada pé.  
Meça o perímetro do peito do pé.



MATERIAL  
RESPIRÁVEL

Finalidade: Para suporte do pé, arco e calcanhar.

Composição: Thermoplastic Elastomer, Polypropylene, Nylon, Polyester, Polyurethane, Spandex.  
Se o produto provocar desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.  
3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.


## COMO UTILIZAR:



Abra a faixa aderente e coloque o suporte de modo a que se ajuste comodamente por de baixo do arco do pé (os ícones de pé devem ser posicionados contra o interior do arco).



Fixe na parte superior do pé com a faixa aderente. Utilize a faixa aderente para puxar para cima o arco.

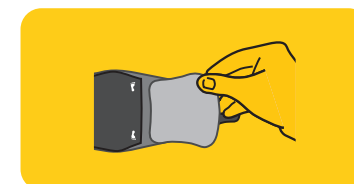

O símbolo do pé na faixa deve corresponder ao símbolo do pé na tala.

Recomenda-se a utilização das fitas durante 4 horas no primeiro dia, aumentando gradualmente, em seguida, 1-2 horas por dia. Após 1 semana, caso sinta necessidade de mais suporte, mude para a inserção azul escura e volte a seguir o período de utilização gradual. As fitas devem ser utilizadas em ambos os pés, para garantir um alinhamento corporal adequado.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

