



FUTURO™ SUPPORTO TERAPEUTICO PER L'ARCO PLANTARE

48510

 **SUPPORTO
MODERATO**

**Contribuisce a fornire supporto ai piedi
con sintomi da fascite plantare.**

IDEALE PER:

Ideale per il supporto nelle attività sportive e di tutti i giorni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Due inserti plantari rimovibili per un supporto personalizzato.
- Grazie al profilo sottile può essere indossato con o senza calze e/o scarpe.
- Offre compressione, supporto e ammortizzazione.

TAGLIA:

Codice Prodotto	CM
48510	21.6-30.5



Regolare in base alle dimensioni del piede.
Un supporto per ogni piede.
Misurare la circonferenza del collo del piede.



**MATERIALE
TRASPIRANTE**


COME INDOSSARLO:



Aprire la chiusura a strappo e posizionare il supporto sotto l'arco del piede (con i simboli del piede rivolti verso l'interno dell'arco).



Agganciare la linguetta per fissare il supporto sulla parte superiore del piede. Utilizzare la linguetta per sollevare l'arco.

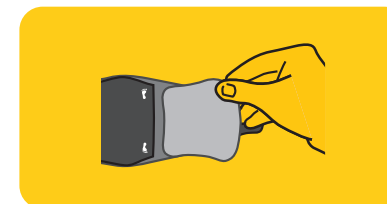

Far combaciare il simbolo del piede sulla chiusura a strappo con quello sull'inserto.

Si consiglia di indossare le fasce per quattro ore il primo giorno e, successivamente, aumentare gradualmente l'utilizzo di una o due ore al giorno. Dopo una settimana passare all'inserto blu scuro e attenersi ai tempi di utilizzo gradualmente per un maggiore sostegno. Indossare le fasce su entrambi i piedi per un allineamento corretto del corpo.

Destinazione d'uso: Per sostenere il piede, l'arco e il tallone.

Composition: Thermoplastic Elastomer, Polypropylene, Nylon, Polyester, Polyurethane, Spandex.
Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.
I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello MI
www.3mitalia.it/futuro

3M