



FUTURO™

THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR DAS FUSSGEWÖLBE

48510EUI



MITTLERER
STÜTZGRAD

Unterstützt die Füße bei Symptomen
der Plantarfasziitis.

IDEAL FÜR:

Die tägliche Unterstützung in Sport und Alltag

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Zwei austauschbare Einlagen bieten passgenaue Unterstützung.
- Flaches Profil – kann mit oder ohne Socken und/oder Schuhe getragen werden.
- Bietet Kompression, Unterstützung und Polsterung.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PZN	CM
48510EUI	4851947	21.6-30.5



Kann angepasst werden.
Eine Bandage für jeden Fuß.
Messen Sie den Spannumfang.


TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie den Klettstriemen und legen Sie die Bandage so an, dass sie bequem unter dem Fußgewölbe sitzt (die Fußsymbole sollten dabei auf die Innenseite des Fußgewölbes zeigen).



Befestigen Sie die Bandage mit der Hakenschlaufe auf der Oberseite des Fußes. Ziehen Sie die Bandage mit der Hakenschlaufe über das Fußgewölbe.

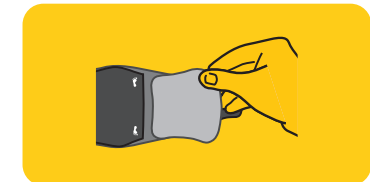

Richten Sie das Fußsymbol auf dem Riemen am Fußsymbol der Einlage aus.

Es wird empfohlen, die Bandagen am ersten Tag 4 Stunden zu tragen und die Tragedauer danach täglich um 1 bis 2 Stunden zu erhöhen. Wenn Sie nach einer Woche das Gefühl haben, mehr Unterstützung zu benötigen, wechseln Sie zu der dunkelblauen Einlage und steigern Sie die Tragedauer wieder schrittweise von Tag zu Tag. Die Bandagen sollten an beiden Füßen getragen werden, um eine korrekte Körperhaltung sicherzustellen.



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Zur Unterstützung von Fuß, Fußgewölbe und Ferse.

Zusammensetzung: Thermoplastisches Elastomer, Polypropylen, Nylon, Polyester, Polyurethan, Spandex.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.
3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care,
Euro Plaza, Gebäude J,
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

3M