



# FUTURO™ SOUTIEN THÉRAPEUTIQUE DE LA VOÛTE PLANTAIRE

48510

 SOUTIEN  
MODÉRÉ

Aide à soutenir les pieds présentant  
des symptômes de fasciite plantaire.

## INDIQUÉ POUR:

Un soutien de jour lors des activités  
quotidiennes et sportives

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Deux supports arqués amovibles offrent un soutien personnalisé.
- Support fin - peut être porté avec ou sans chaussettes et/ou chaussures.
- Apporte compression, soutien et amortissement.

## TAILLES:

Category Number	cm
48510	21.6-30.5



Ajuster à la taille.  
Un support pour chaque pied.  
Mesurez la circonférence du cou-de-pied.


## MODE D'EMPLOI:



Ouvrez la sangle avec système de fermeture auto-agrippant et placez le soutien de manière à ce qu'il repose confortablement sous la voûte plantaire (les icônes de pied doivent être placées contre l'intérieur de la voûte).



À l'aide de la languette auto-agrippante, fixez l'ensemble sur le dessus du pied. Utilisez la languette auto-agrippante pour tirer sur la voûte.

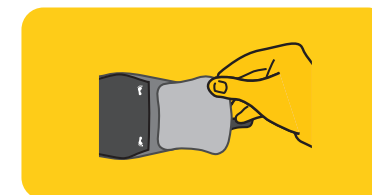

Faites correspondre le symbole de pied sur la sangle au symbole de pied sur l'insert.

Il est recommandé de porter les supports pendant 4 heures le premier jour et d'augmenter ensuite progressivement de 1 à 2 heures par jour. Après 1 semaine, si davantage de soutien s'avère nécessaire, passez au support bleu foncé et suivez à nouveau les périodes progressives de port. Les supports doivent être portés aux deux pieds pour assurer un alignement correct du corps.



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir le pied, la voûte plantaire et le talon.

Composition: Thermoplastic Elastomer, Polypropylene, Nylon, Polyester, Polyurethane, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

**3M**