



FUTURO™ THERAPEUTISCHE ONDERSTEUNING VAN DE VOETBOOG

48510



Helpt voeten met symptomen van fasciitis plantaris te ondersteunen.

IDEAAL VOOR:

Ideaal voor ondersteuning overdag, tijdens het sporten en dagelijkse activiteiten.

HOOFDKENMERKEN:

- ① Twee uitneembare voetboogstukken voor ondersteuning op maat.
- Dun profiel, kan worden gedragen met of zonder sokken en/of schoenen.
- Biedt compressie, ondersteuning en demping.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
48510	3718897	21.6-30.5



Aanpassen.
Eén steun per voet.
Meet de omtrek van de wreef.



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ondersteunt de voet, voetboog en hiel.

Samenstelling: Thermoplastisch Elastomeer, Polypropyleen, Nylon, Polyester, Polyurethaan, Spandex.
Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.
3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.


DRAAGINSTRUCTIES:



Maak de klittenbandriem los en breng de steun zo aan dat deze prettig onder de voetboog ligt (de kant met de voetjes moet richting de binnenkant van de voetboog zijn gekeerd).



Zet vervolgens bovenop de voet vast met het klittenband. Trek de voetboog omhoog met de klittenbandriem.

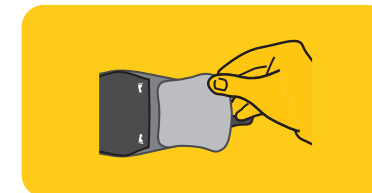

Let op dat het voetsymbool op de riem overeenkomt met het voetsymbool op het voetboogstuk.

Het wordt aanbevolen om de banden de eerste dag 4 uur te dragen en daarna geleidelijk op te bouwen met 1-2 uur per dag. Als na een week blijkt dat u meer steun nodig hebt, kunt u overstappen op de donkerblauwe voetboogstukken en wederom de draagtijd opbouwen. Voor een juiste lichaamshouding moeten de banden aan beide voeten worden gedragen.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

