



FUTURO™ TERAPEUTISK SVANGSTØTTE

48510



Hjælper med at støtte fødder med symptomer på plantar fasciitis.

VELEGNET TIL:

Perfekt til støtte i dagtimerne ved hverdagsaktiviteter og fysisk aktivitet

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 To udtagelige svangindlæg giver brugertilpasset støtte.
- Tynd profil – kan anvendes med eller uden strømper og/eller sko.
- Giver kompression, støtte og polstring.

STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
220714	21.6-30.5



Kan tilpasses.
En strop til hver fod.
Mål vristens omkreds.



ÅNDBART
MATERIALE

Tilsligtet anvendelse: Til støtte af fod, svang og hæl.

Materialiesammensætning: Termoplastisk elastomer, Polypropylen, Nylon, Polyester, Polyurethan, Spandex.
Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.
3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.


SÅDAN BRUGES DEN:



Åbn stroppen, og anbring støtten, så den hviler komfortabelt under svangen på foden (fodkonerne skal vende indad mod svangen).



Støtten fastgøres oven på foden ved hjælp af stropperne. Brug stroppen til at trække støtten op omkring svangen.

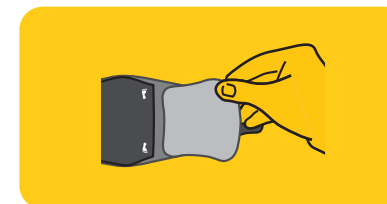

Sørg for, at fodsymbolet på stroppen matcher fodsymbolet på indlægget.

Det anbefales at have stroppen på i 4 timer den første dag, og herefter gradvist øge med 1-2 timer per dag. Hvis du efter en uge føler, du har brug for yderligere støtte, så skift til det mørkeblå indlæg, og forlæng igen gradvist tiden, du har den på. Du skal have stropperne på begge fødder for at sikre korrekt kropsholdning.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

