



FUTURO™ PLANTAR FASCIIT STÖD FÖR NATTEN

48507



FUKTAVLEDANDE



VENTILERANDE
MATERIAL

Stöd för fötter med plantar fasciitis.

PERFEKT FÖR:

Perfekt stöd under natten när du sover

VIKTIGA FUNKTIONER:

- ① Utformat för att bekvämt hålla foten i rekommenderat läge.
- ② Bekväm och justerbar passform.
- ③ Justerbar fotrem.

STORLEK:

Artikel Nummer	CM
48507	20.3-38.1




Justera för anpassad storlek.
Passar både vänster och höger fot.
Mät omkretsen cirka 5 cm ovanför fotknölen.

ANVÄNDNING:



Lossa kardborrebanden på vad- och fotremmarna. Stick in foten genom vadremmen så att stödet hamnar på fotens ovansida.

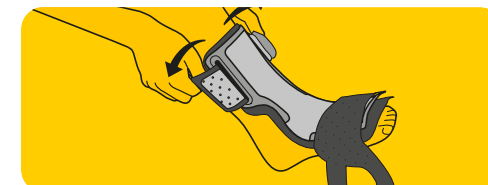

Rätta till stödet så att vadremmen hamnar cirka 5 cm ovanför fotknölen. Justera vadremmen från båda sidor för en fast men bekväm passform.



Centrera fotremmens breda del under den främre trampdynan. Fäst kardborrebandet på fotremmens breda ände på stödets ovansida.



Böj upp tårna, dra åt remmen runt foten och fäst kardborrebandet.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden



Avsedd användning: För stöd åt fot, fotvalv och häl.

Kontraindikationer: Den här produkten rekommenderas inte för personer med diabetes, nervåkommor eller kärlsjukdomar. Produkten är inte avsedd att användas med belastning. Rådgör med din läkare innan du använder produkten.

Material: Polypropylen, Polyuretan, Nylon, Polyester, Termoplastisk elastomer, Spandex.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.