



FUTURO™ SOPORTE NOCTURNO PARA FASCITIS PLANTAR

48507



AÍSLA DE LA HUMEDAD



MATERIAL TRANSPIRABLE

Soporte diseñado para dar apoyo al pie para tratar los síntomas de fascitis plantar.

IDEAL PARA:

Ideal para utilizar como soporte nocturno

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Diseñado para sujetar el pie cómodamente en la posición recomendada.
- 2 Cómodo, ajustable.
- 3 Correa en el pie ajustable.


TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
189732.9	20.3-38.1

Ajustable.
Adecuado para el pie izquierdo y para el pie derecho.
Mida la circunferencia aproximadamente 5cm por encima del tobillo.



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

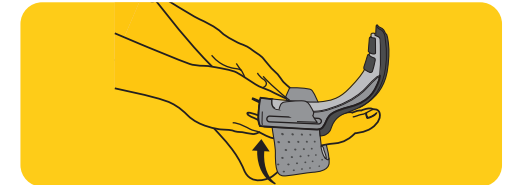

Añaje las sujeciones de las bandas de la pantorrilla y del pie. Deslice el pie a través de la banda de la pantorrilla hasta que el apoyo descansa encima del pie.



Ajuste la posición del soporte hasta que la banda de la pantorrilla esté aproximadamente 5cm por encima del tobillo. Ajuste la banda de la pantorrilla por ambos lados para que la sujeción sea firme pero cómoda.



Centre la parte ancha de la banda del pie debajo de la almohadilla del pie. Pase la sujeción del extremo más ancho de la banda del pie a la parte superior del soporte.



Tire de los dedos hacia arriba, envuelva la banda restante alrededor del pie y aplique la sujeción.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid



Uso previsto: Sujeción del pie, arco plantar y talón.

Contraindicaciones: Este producto no está recomendado para personas con diabetes, neuropatía o enfermedad vascular. Producto no destinado a soportar cargas. Consulte a su médico antes de usar este producto.

Composición: Polypropylene, Polyurethane, Nylon, Polyester, Thermoplastic Elastomer, Spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.