



FUTURO™ SUPORTE NOTURNO PARA A FASCITE PLANTAR

48507



SUPORTE
FIRME



MATERIAL
ABSORVENTE



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Suporte desenhado para dar apoio ao pé para tratar sintomas da Fascite plantar.

IDEAL PARA:

Ideal para suporte noturno durante o sono

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Concebido para manter confortavelmente o pé na posição recomendada.
- 2 Ajuste confortável.
- 3 Tira ajustável ao pé.


TAMANHOS:

C.N.P	CM
6274167	20.3-38.1

Ajuste ao tamanho.
Adequado ao pé esquerdo e direito.
Meça o perímetro aproximadamente 5cm acima do tornozelo.



COMO UTILIZAR:

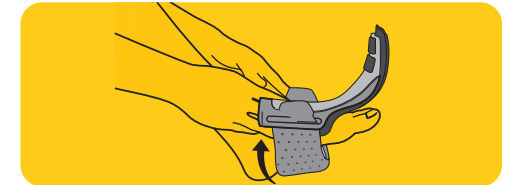

Solte os fechos das fitas do pé e barriga da perna. Faça escorregar o pé pela fita da barriga da perna, para que o apoio se faça na parte superior do pé.



Ajuste a posição do suporte, de modo a que a fita da barriga da perna se posicione aproximadamente 5cm acima do tornozelo. Ajuste a fita da barriga da perna de ambos os lados, até encontrar um ajuste firme e confortável.



Centre a porção larga da fita do pé por baixo da planta do pé. Aperte o fecho da parte mais larga da tira do pé à parte superior do suporte.



Levante os dedos do pé, enrole o resto da fita à volta do pé e aperte o fecho.

Finalidade: Para suporte do pé, arco e calcanhar.

Contraindicações: Este produto não é recomendado a indivíduos com diabetes, neuropatia ou doença vascular. Produto não adequado a portadores de carga. Consulte o médico antes de utilizar.

Composição: Polypropylene, Polyurethane, Nylon, Polyester, Thermoplastic Elastomer, Spandex.

Se o produto provocar desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

