



# FUTURO™

## SOUTIEN NOCTURNE DE FASCIITE PLANTAIRE

48507



ÉVACUATION DE L'HUMIDITÉ



MATÉRIAU RESPIRANT

Soutien pour les pieds présentant des symptômes de fasciite plantaire.

### INDIQUÉ POUR:

Le soutien de nuit pendant le sommeil

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Conçu pour maintenir confortablement le pied à la position recommandée.
- 2 Coupe confortable et ajustable.
- 3 Soutien de la voûte plantaire ajustable.


### TAILLES:

Category Number	cm
48507	20.3-38.1




Ajuster à la taille  
Convient au pied gauche ou droit.  
Mesurez la circonférence à environ 5 cm au-dessus de l'os de la cheville.

### MODE D'EMPLOI:

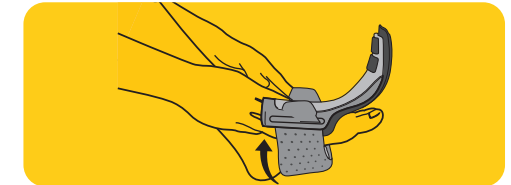

Desserrez l'attache de la sangle du mollet et du pied.  
Faites glisser le pied dans la sangle du mollet afin que le support repose sur le dessus du pied.

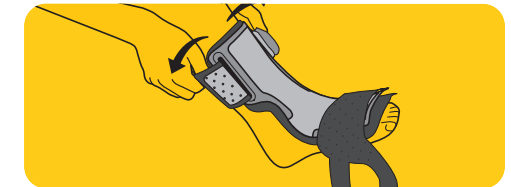

Ajustez la position du support de manière à ce que la sangle du mollet se trouve à environ 5 cm au-dessus de l'os de la cheville. Ajustez la sangle du mollet des deux côtés pour obtenir un ajustement ferme et confortable.



Centrez la partie large de la sangle sous la partie supérieure de la voûte plantaire. Fixez le côté le plus large de la sangle sur le haut du support.



Tirez les orteils vers le haut, enroulez le reste de la sangle autour du pied et attachez la fixation.

Utilisation prévue: Pour soutenir le pied, la voûte plantaire et le talon.

**Contre-indications:** Ce produit est déconseillé pour les personnes atteintes de diabète, de neuropathie ou de maladie vasculaire. Produit non adapté en cas de port de charges. Consultez votre médecin avant utilisation.

Composition: Polypropylène, Polyuréthane, Nylon, Polyester, Thermoplastic Elastomer, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

3M