



FUTURO™

ONDERSTEUNING GEDURENDE DE NACHT BIJ FASCIITIS PLANTARIS

48507



STEVIGE
STEUN



VOCHTREGULEREND



ADEMEND
MATERIAAL

Steun voor voeten met symptomen van fasciitis plantaris.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning tijdens het slapen

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Ontwikkeld om de voet comfortabel in de aanbevolen stand te houden.
- 2 Comfortabele, verstelbare pasvorm.
- 3 Aanpasbare voetriem.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
48507	3718905	20.3-38.1




Aanpassen.
Zowel links als rechts te dragen.
Meet de omtrek circa 5 cm boven het enkelbeen.

DRAAGINSTRUCTIES:



Maak de kuit- en voetriemen los. Schuif de voet door de kuitband, zodat de steun boven op de voet ligt.

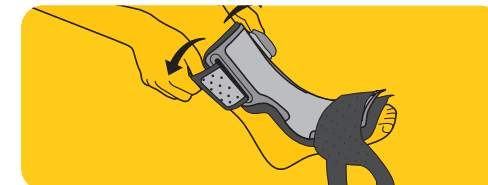

Plaats de steun zo dat de kuitband ongeveer 5 cm boven het enkelbeen zit. Trek de kuitband van twee kanten aan, zodat deze stevig maar comfortabel zit.



Centreer het brede deel van de voetband onder de bal van de voet. Zet het brede einde van de voetband vast boven op de steun.



Trek de tenen omhoog, wind het losse deel van de band rondom de voet en zet vast.

Beoogd gebruik: Ondersteunt de voet, voetboog en hiel.

Contra-indicaties: Dit product wordt niet aanbevolen voor personen met diabetes, neuropathie of vaatandoeningen. Dit product is niet bedoeld voor gebruik bij fysieke belasting. Raadpleeg vóór gebruik uw arts.

Samenstelling: Polypropyleen, Polyurethaan, Nylon, Polyester, Thermoplastic Elastomeer, Spandex.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro