



# FUTURO™ PLANTAR FASCIITIS NATSTØTTE

48507



FAST  
STØTTE



SVEDTRANSPORTERENDE



ÅNDBART  
MATERIALE

Støtte til fødder med symptomer  
på plantar fasciitis.

## VELEGNET TIL:

Perfekt til støtte om natten, mens du sover

## NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Designet så foden komfortabelt holdes i den anbefalede stilling.
- 2 Komfortabel, justerbar pasform.
- 3 Justerbar fodstrop.

## STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
220716	20.3-38.1


Kan tilpasses.  
Kan bruges på både venstre og højre fod.  
Mål omkredsen ca. fem cm over ankelknoglen.



## SÅDAN BRUGES DEN:



Løsn lukningerne på læg- og fodstropperne. Stik foden gennem lægstroppen, så støtten hviler ovenpå foden.

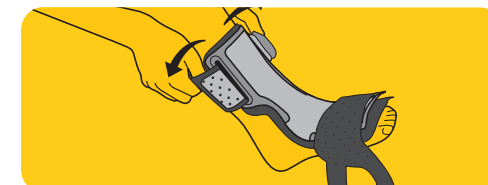

Tilpas placeringen af støtten, så lægstroppen er ca. fem cm over ankelknoglen. Juster lægstroppen fra begge sider for at få en fast, men komfortabel, tilpasning.



Centrer den brede del af fodstroppen under fodballen. Sæt lukningen fast på den brede ende af fodstroppen for at fuldende støtten.



Træk tæerne op, vikl resten af stroppen rundt om foden, og fastgør lukningen.

3M a/s  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Denmark

3M

Tilsigtet anvendelse: Til støtte af fod, svang og hæl.

**Kontraindikationer:** Produktet er ikke egnet til personer med diabetes, neuropati eller vaskulær sygdom. Produkt må ikke anvendes ved belastning. Du skal kontakte din læge før brug.

Materialesammensætning: Polyethylen, Polyurethan, Nylon, Polyester, termoplastisk elastomer, Spandex.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.