



FUTURO™ HANDGELENK-BANDAGE FÜR DIE NACHT

48462DABI

**MITTLERER
STÜTZGRAD**



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

**Bietet Unterstützung für
Handgelenke mit Symptomen des
Karpaltunnelsyndroms*.**

IDEAL FÜR:
Nächtliche Unterstützung für Handgelenke
mit Symptomen des Karpaltunnelsyndroms*

EIGENSCHAFTEN:

- ① Verstellbare Riemen bieten
passgenauen Sitz.
- ② Stütze der Handfläche bietet
mittlere Stabilität.
- ③ Weiche Materialien und Mikroperlen-
Polsterung halten die Hand nachts in
einer komfortablen, neutralen Position.
- Zur Unterstützung einer neutralen
Handgelenk- und Handstellung.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	CM
48462DABI	4992286	13.3-22.9

Handgelenkumfang an der schmalsten Stelle messen.



TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie die Verschlüsse. Stecken Sie die
Hand in die Bandage und positionieren Sie
die Metallschiene entlang der Handfläche.



Schließen Sie den mittleren Klettverschluss
und dann die Verschlüsse daneben. Stellen
Sie alle Schließen so ein, dass Sie ein festes,
aber bequemes Tragegefühl haben. Streichen
Sie das Komfortpolster auf der Handfläche
nach oben in Richtung der Fingergelenke
aus, damit die Hand in möglichst neutraler
Stellung ruht.

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken

Reißt oder öffnet sich das Mikroperlenkissen, sollten Sie die Bandage und die Mikroperlen sofort entsorgen: Einzelne Kugeln können eine Erstickungsgefahr darstellen.

*Ärzte empfehlen oft die Anwendung einer festen Handgelenkbandage während der Behandlung des Karpaltunnelsyndroms und anderer schmerzhafter Handgelenkbeschwerden.

Zusammensetzung: Nylon, Polyurethanschaum, Aluminium, Polyester, Elasthan, geschäumtes Polystyrol.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

