



# FUTURO™ SOPORTE NOCTURNO PARA LA MUÑECA

48462

 SOPORTE  
MODERADO



MATERIALES  
TRANSPIRABLES

Uso previsto: Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

**Si la bolsa de microesferas se rompe o se abre, desechar inmediatamente: las microesferas sueltas pueden suponer un riesgo de asfixia.**

\*Los médicos suelen recomendar el uso de una muñequera rígida para tratar el síndrome del túnel carpiano y otros trastornos dolorosos de la muñeca

Composición: Nylon, Polyurethane Foam, Aluminium, Polyester, Spandex, Expanded Polystyrene.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

**Soporte de muñeca para tratar los síntomas del síndrome del tunel carpiano.\***

## IDEAL PARA:

Soporte de muñeca nocturno para tratar los síntomas del síndrome del tunel carpiano\*

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 Tiras regulables que proporcionan un ajuste personalizado.
  - 2 Estabilizador palmar que proporciona una estabilización moderada.
  - 3 Materiales suaves y acolchados hechos de microesferas que mantienen la mano en una cómoda posición neutra durante la noche.
- Diseñada para favorecer una posición neutra de la muñeca y la mano.

## TOMAR LA MEDIDA:

| CÓDIGO NACIONAL | CM        |
|-----------------|-----------|
| 162422.2        | 13.3-22.9 |

Medir el contorno de la muñeca a partir del punto de menor tamaño.



## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abra los cierres. Introduzca la mano en el soporte colocando la férula metálica a lo largo de la palma.



Fije el cierre central y a continuación los contiguos. Ajuste todos los cierres hasta conseguir una sujeción firme pero cómoda. Extienda la bolsa de microesferas a lo largo de la palma hasta la base de los dedos para promover una posición neutra de la mano.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

