



FUTURO™ SUPORTE DE PULSO NOTURNO

48462

 **SOPORTE
MODERADO**



**MATERIAIS
RESPIRÁVEIS**

Finalidade: Proporcionar suporte de pulso rígido, fraco ou lesionado.

Se o saco das contas se romper/abrir, deite fora imediatamente: as contas soltas podem representar perigo de asfixia.

*Os médicos recomendam frequentemente o uso de um suporte de pulso rígido durante o tratamento da Síndrome do Canal Cárpico e noutros quadros dolorosos dos pulsos.

Composição: Nylon, Polyurethane Foam, Aluminium, Polyester, Spandex, Expanded Polystyrene.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

**Suporte de mão para tratar os sintomas
do síndrome do túnel cárpico.***

IDEAL PARA:

Suporte de mão noturno para tratar os
sintomas do síndrome do túnel cárpico*

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Tiras ajustáveis proporcionam ajuste personalizado.
 - 2 O estabilizador palmar ajuda a proporcionar estabilidade moderada.
 - 3 Materiais macios e contas almofadadas mantêm a mão numa posição confortável e neutra durante a noite.
- Desenhado para promover uma posição neutra do pulso e da mão.

TOMAR LA MEDIDA:

C.N.P	CM
6201335	13.3-22.9

Tire a medida à volta do pulso no ponto mais pequeno.



COMO UTILIZAR:



Abra os fechos. Introduza a mão no suporte com a tala metálica posicionada ao longo da palma da mão.



Feche a fecho central e, em seguida, os fechos adjacentes. Ajuste todos os fechos até sentir firmeza e conforto. Espalhe o Saco de Contas Confortável pela palma da mão até à base dos dedos para promover puma posição neutra da mão.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

3M