



FUTURO™ BANDAGE REPOSE POIGNET NOCTURNE

48462



MATÉRIAU
RESPIRANT

Fournit un soutien aux poignets
présentant des symptômes du
syndrome du canal carpien.*

INDIQUÉ POUR:

Soutien nocturne pour les poignets présentant
des symptômes du syndrome du canal carpien*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Sangles réglables pour une mise en place ajustée.
 - 2 Le stabilisateur palmaire aide à fournir une stabilité modérée.
 - 3 Les matériaux souples et les microbilles d'amortissement maintiennent la main dans une position neutre et confortable au cours de la nuit.
- Conçu pour favoriser une position neutre du poignet et de la main.

TAILLES:

Category Number	cm
48462	13.3-22.9



Mesurer le tour du poignet à l'endroit le plus petit.

MODE D'EMPLOI:



Ouvrez les fixations. Faites glisser la main dans l'orthèse avec l'attelle métallique placée le long de la paume de la main.



Fermez la fixation centrale, puis les fixations adjacentes. Réglez toutes les fixations jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable. Étirez la poche de roulements Confort le long de la paume et jusqu'à la base des doigts pour favoriser une position neutre de la main.

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

Si le sac de perles se déchire ou s'ouvre, jetez-le immédiatement: les perles présentent un risque d'étouffement.

*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux.

Composition: Nylon, Polyurethane Foam, Aluminium, Polyester, Spandex, Expanded Polystyrene.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

