



FUTURO™ NACHTPOLS BANDAGE

48462



ADEMENDE
MATERIALEN

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

Gooi gescheurde of open parelkussens direct weg: losse parels kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

*Artsen raden vaak het gebruik van een rigide polsbrace aan voor behandeling van Carpal Tunnel-Syndroom en andere pijnlijke polsaandoeningen.

Samenstelling: Nylon, Polyurethaanschuim, Aluminium, Polyester, Spandex, Polystyreenschuim.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Geeft steun aan polsen met symptomen
van Carpal Tunnel-Syndroom*

IDEAAL VOOR:

Nachtelijke steun voor polsen met
symptomen van Carpal Tunnel-Syndroom*

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Verstelbare riemen zorgen voor een goede pasvorm.
 - 2 Palmstabilisator voor matige stabilisatie.
 - 3 Zachte materialen en parelkussentjes houden uw hand 's nachts in een comfortabele, neutrale houding.
- Ontworpen om een neutrale pols- en handhouding te bevorderen.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
48462	2833911	13.3-22.9

Meet rondom de pols waar deze het smalst is.



DRAAGINSTRUCTIES:



Open de sluitingen. Schuif een hand in de bandage met de metalen spalk over de handpalm.



Sluit het middelste klittenband en vervolgens het overige klittenband. Verstel al het klittenband totdat dit strak maar comfortabel zit. Spreid het uit over de handpalm tot aan de basis van de vingers om een neutrale handstand te bevorderen.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

