



# FUTURO™ WRAP AROUND FOTLEDSSTÖD

47874-76



VENTILERANDE  
MATERIAL

Ger stöd till stela, ömma eller  
skadade fotleder.

## PERFEKT FÖR:

Allmänt stöd, promenader, löpning, träning

## VIKTIGA FUNKTIONER:

- ① Justerbart band för anpassad passform och stöd.
- Lyfter och stödjer fotvalvet.
- Får enkelt plats i skon.

## STORLEK:



Artikel Nummer	Storlek	CM
47874	S	17.8-20.3
47875	M	20.3-22.9
47876	L	22.9-25.4

## ANVÄNDNING:



Trä in foten i den elastiska öppningen.  
Se instruktionsbilder för vänster fotled.  
[För höger fotled, vänd stödet ut och in].



Linda det justerbara bandet runt fotleden  
som visas på bild 2 och 3.



Spänn åt det justerbara bandet för önskat  
tryck och fäst med kardborrebandet. Undvik  
att fästa kardborrebandet ovanpå vristen, då  
det kan skapa irritation vid skoanvändning.

Avsedd användning: Ger stöd till stela, ömma eller skadade fotleder.

**VAR FÖRSIKTIG!** Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan förorsaka allergiska reaktioner.

Material: Nylon, Gummi, Polyester, Spandex.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Svenska AB  
Herrjärva torg 4,  
170 67 Solna  
Sweden

**3M**