



FUTURO™ TOBILLERA

47874-76



SOPORTE
MODERADO



MATERIAL
TRANSPIRABLE

Proporciona soporte para tobillos débiles, doloridos o lesionados.

IDEAL PARA:

Soporte general, caminar, correr, ejercicio, senderismo etc.

CARACTERÍSTICAS:


- 1 Correa ajustable para un ajuste y soporte personalizado.
- Eleva y sujeta el arco plantar.
- Se adapta fácilmente al calzado.

TOMAR LA MEDIDA:



CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
200667.6	S	17.8-20.3
336388.4	M	20.3-22.9
200675.1	L	22.9-25.4

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

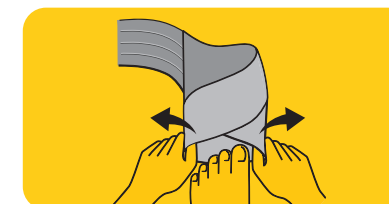

Deslice el pie sobre la parte elástica. Vea el diagrama para el tobillo izquierdo. Para el tobillo derecho, invierta del revés el soporte.



Envuelva el tobillo con la tira alrededor como se muestran en fotos 2 y 3.



Ancle el asa del gancho en la banda, ajustando la tira en función del confort deseado. Evite anclar los enganches en la cara Interior del pie ya puede causar irritación al llevar zapatos.

Uso previsto: Proporciona soporte para tobillos rígidos, doloridos o lesionados.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas

Composición: Nylon, Rubber, Polyester, Spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

