

### FUTURO™ CAVIGLIERA ELASTICA

47874-76





## Supporta caviglie rigide, dolenti o lesionate.

#### **IDEALE PER:**

Supporto generale, camminata, corsa, esercizio, escursionismo


# CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Fascia regolabile per un adattamento e un supporto personalizzati.
- Solleva e supporta l'arco plantare.
- Si adatta facilmente all'interno della scarpa.

### TAGLIA:



**TRASPIRANTE** 

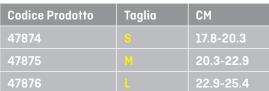



Destinazione d'uso: Per supportare caviglie rigide, dolenti o lesionate.

 $\textbf{ATTENZIONE:} \ \textbf{Questo prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche.}$ 

Composition: Nylon, Rubber, Polyester, Spandex.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico. I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Comunicazione technico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

### **COME INDOSSARLO:**



Far scorrere il piede nella parte elasticizzata. Consultare il disegno per la caviglia sinistra (per la caviglia destra, rovesciare il tutore).



Avvolgere le chiusure a strappo intorno alla cavialia come mostrano le immagini 2 e 3.



Fissare gli strappi sul bendaggi, sistemandoli in modo confortevole. Evitare di fissare gli strappi sul collo del piede, perché potrebbe causare irritazioni nell'indossare le calzature.

3M Office Via N. Bobbio 21 20096 Pioltello MI www.3mitalia.it/futuro

