



FUTURO™ SPRUNGGELENK-BANDAGE

47874DABI, 47875DABI, 47876DABI



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

**Unterstützung von schwachen,
schmerzenden oder verletzten
Sprunggelenken.**

IDEAL FÜR:

Allgemeine Unterstützung, Laufen, Training
und Wandern

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Anpassbarer Gurt für passgenauen Sitz
und Unterstützung.
- Hebt und stützt das Fußgewölbe.
- Passt bequem in den Schuh.

GRÖSSE:



Artikelnummer	Größe	PZN	CM
47874DABI	S	3041761	17.8-20.3
47875DABI	M	3041778	20.3-22.9
47876DABI	L	3041784	22.9-25.4

TRAGEANWEISUNG:



Setzen Sie den Fuß in den elastischen Teil.
Das Bild zeigt das linke Sprunggelenk (für
das rechte Sprunggelenk wenden Sie die
Bandage von innen nach außen).



Legen Sie das Band wie in den Abbildungen
2 und 3 gezeigt um das Sprunggelenk.



Schließen Sie den Klettverschluss an der
Bandage. Dabei können Sie das Band auf
den gewünschten Komfort einstellen. Der
Verschluss sollte möglichst nicht auf dem
Spann liegen, da dies beim Tragen von
Schuhen stören kann.

Verwendungszweck: Unterstützung von steifen, schmerzenden oder verletzten Sprunggelenken.

ACHTUNG: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, was allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Zusammensetzung: Nylon, Gummi, Polyester, Elasthan.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M Österreich GmbH
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien
www.futuro.de

