



FUTURO™ KIERRETTÄVÄ NILKKATUKI

47874-76

 KESKITASON
TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Tukee heikkoa, kipeää tai
vahingoittunutta nilkkaa.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Yleistukena, urheilussa esim kävelyssä,
juoksussa ja patikoinissa.

OMINAISUUDET:

- 1 Säädettävä hihna sopivan istuvuuden
ja tuen löytämiseksi.
- Kohottaa ja tukee jalan kaarta.
- Istuu helposti kengän sisälle.

KOKO:



Tuotekoodi	Koko	CM
47874	S	17.8-20.3
47875	M	20.3-22.9
47876	L	22.9-25.4

TUEN ASETTAMINEN:



Liu'uta jalka elastiseen osaan. Katso
kuvasta vasempaan nilkkaan asettamisen
ohje (käännä tuki nurin päin ennen sen
asettamista oikeaan nilkkaan).



Kiedo kiinnityshihna nilkan ympäri, kuten
kuvissa 2 ja 3 esitetään.



Kiinnitä siteen tarrakiinnitys ja säädä
hihnan kireys sopivaksi. Vältä kiinnikkeiden
kiinnittämistä jalkapöydän kohdalle, koska
se voi ärsyttää ihoa kenkiä käytettäessä.

Käyttötarkoitus: Jäykän, kipeän tai vahingoittuneen nilkan tukeminen.

VAROITUS: Tämä tuote sisältää luonnonkumilateksia, joka voi aiheuttaa yliherkkyysoireita.

Koostumus: nailon, kumi, polyesteri, elastaani.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M