



FUTURO™ ENKELBANDAGE

47874-76



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ondersteuning van een stijve, pijnlijke of geblesseerde enkel.

LET OP: Dit product bevat latex uit natuurrubber en kan mogelijk allergische reacties veroorzaken.

Samenstelling: Nylon, Rubber, Polyester, Spandex.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Ondersteunt een zwakke, pijnlijke of
geblesseerde enkel.

IDEAAL VOOR:

Algemene ondersteuning, lopen, hardlopen,
sporten, wandelen.

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Verstelbare riem voor een goede pasvorm
en ondersteuning.
- Ondersteunt en tilt de voetboog op.
- Past gemakkelijk in uw schoen.

MAAT:



Referentie	CNK	Maat	CM
47874	2251650	S	17.8-20.3
47875	2251643	M	20.3-22.9
47876	2251635	L	22.9-25.4

DRAAGINSTRUCTIES:



Schuif de voet in het elastische gedeelte.
Zie afbeelding voor de linkerenkel. (voor de
rechterenkel, draai de steun binnenste buiten).



Wikkel de riem rond de enkel zoals
aangegeven op afbeeldingen 2 en 3.



Bevestig de haak-en-lus-sluiting op de band en
trek de riem aan om het juiste comfortniveau
te bekomen. Vermijd de sluiting op de wreef
te bevestigen, dit kan leiden tot irritatie bij het
dragen van schoenen.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

