



FUTURO™ OMVIKLINGSSTØTTE TIL ANKEL

47874-76



ÅNDBART
MATERIALE

Støtte til svage, ømme eller skadede ankler.

VELEGNET TIL:

Generel støtte, gang, løb, motion, vandring

NØGLEFUNKTIONER:

- ① Justerbar strop for brugertilpasset pasform og støtte.
- Løfter og støtter svangen på foden.
- Passer let i din sko.

STØRRELSESVALG:



Varenr	Størrelse	CM
213032	S	17.8-20.3
213031	M	20.3-22.9
213030	L	22.9-25.4

SÅDAN BRUGES DEN:



Før foden ind i den elastiske del. Se diagram for venstre ankel (ved højre ankel vendes støtten med vrangen ud).



Vikl stroppen omkring anklen som vist på billede 2 og 3.



Fæstn krog og løkke-lukningen på bandagen, og juster stroppen efter behag. Undgå at fæstne lukningen på vristen, da dette kan forårsage irritation, når man har sko på.

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, ømme eller skadede ankler.

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturgummilatex, der kan forårsage allergiske reaktioner.

Materialesammensætning: Nylon, Gummi, Polyester, Spandex.

Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

