



# FUTURO™ CHEVILLÈRE

47874-76



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir une cheville raide, douloureuse ou blessée.

**AVERTISSEMENT: Ce produit contient du latex en caoutchouc naturel pouvant entraîner des réactions allergiques.**

Composition: Nylon, Caoutchouc, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit un soutien pour une cheville raide, douloureuse ou blessée.

## INDIQUÉ POUR:

Soutien général, marche, course, exercices, randonnée

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Sangle réglable pour un ajustement et un soutien personnalisés.
- Soulève et soutient la voûte plantaire.
- Se glisse facilement dans la chaussure.

## TAILLES:



Référence	CNK	Taille	CM
47874	2251650	S	17.8-20.3
47875	2251643	M	20.3-22.9
47876	2251635	L	22.9-25.4

## MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le pied dans la partie élastique. Consultez le schéma pour la cheville gauche (pour la cheville droite, tournez le support à l'envers).



Enroulez la sangle autour de la cheville comme illustré sur les photos 2 et 3.



Attachez la fixation auto-agrippante sur le pansement, en ajustant la sangle suivant le confort souhaité. Évitez d'attacher les fixations sur le cou-de-pied, cela peut provoquer une irritation lors du port de chaussures.

3M Belgium bvba/sprl  
Dép. Consumer Health Care  
[www.3m.be/futuro-fr](http://www.3m.be/futuro-fr)

**3M**