



# FUTURO™ ELLENBOGEN-BANDAGE

47861DABI, 47862DABI, 47863DABI



**Bietet sofortige Kompression mit zwei Pelotten für gezielten Druck auf schmerzende Arme.**

**IDEAL FÜR:**  
Alltägliche Aktivitäten

## EIGENSCHAFTEN:

- 1 Elastisches 4-Wege-Material verhindert Verrutschen.
- 2 Anatomisch geformt für stabilen Halt.
- 3 Umschließender Riemen bietet zusätzliche Kompression.

## GRÖSSE:

Artikelnummer	Größe	PHC	CM
47861DABI	S	4486896	22.9-25.4
47862DABI	M	4464676	25.4-27.9
47863DABI	L	4464682	27.9-30.5



Wird um das Ellenbogengelenk gemessen.



ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL

Verwendungszweck: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Ellenbogen und Unterarmen.

Zusammensetzung: Nylon, Silikonkautschuk, Polyester, Elasthan.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

## TRAGEANWEISUNG:



Ziehen Sie die Bandage über den Ellenbogen.



Richten Sie die Pelotten so aus, dass sie an der Ober- und der Unterseite des Unterarms (Speiche und Elle) knapp unter dem Ellenbogen anliegen.



Legen Sie das Band um den Unterarm. Spannen Sie das Band so, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

3M (Schweiz) GmbH  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 93  
8803 Rüschlikon  
[www.3mschweiz.ch/futuro](http://www.3mschweiz.ch/futuro)

