



FUTURO™ BANDAGE DU COUDE EPICONDYLIQUE

47861-63



SOUTIEN
MODÉRÉ

Fournit une compression immédiate
avec des coussinets doubles pour une
pression ciblée sur les bras douloureux.

INDIQUÉ POUR:
Activités quotidiennes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions maintient la coudière en place.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.
- 3 La sangle enveloppante offre une compression supplémentaire.

TAILLES:

Référence	PHC	Taille	CM
47861	4486896	S	22.9-25.4
47862	4464676	M	25.4-27.9
47863	4464682	L	27.9-30.5



Mesurez autour de l'articulation du coude.



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Caoutchouc Silicone, Polyester, Spandex.


Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le support au-dessus du coude.

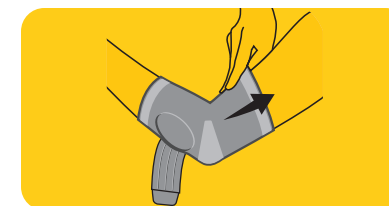

Placez les coussinets de pression de façon à ce qu'ils reposent sur le dessus et le dessous (côtés radial et ulnaire) de l'avant-bras, juste en dessous du coude.



Entourez la sangle autour de l'avant-bras. Serrez jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M (Suisse) S.à r.l.
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
www.3msuisse.ch/futuro

3M