



FUTURO™ GOMITIERA ELASTICA

47861-63



Fornisce una compressione immediata con doppi cuscinetti per una pressione mirata su braccia dolenti.

IDEALE PER:
Attività quotidiane

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Il materiale estensibile in 4 direzioni aiuta a mantenere il supporto in posizione.
- 2 Design sagomato per un adattamento ottimale.
- 3 La fascia avvolgente aumenta la compressione.

TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
47861	S	22.9-25.4
47862	M	25.4-27.9
47863	L	27.9-30.5




Misurare la circonferenza dell'articolazione del gomito.

COME INDOSSARLO:



Infilare il supporto sul gomito.

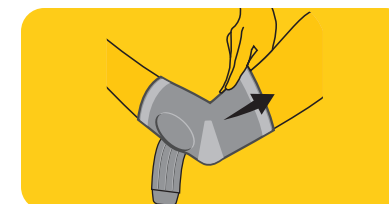

Posizionare i cuscinetti in modo che restino sulla parte inferiore e superiore dell'avambraccio (tra radio e ulna), appena sotto il gomito.



Avvolgere il cinturino intorno all'avambraccio. Stringere per mantenere il supporto fermo ma confortevole.



MATERIALE TRASPIRANTE

Destinazione d'uso: Per supportare gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati.

Composition: Nylon, Silicone Rubber, Polyester, Spandex.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti. 3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pioltello MI
www.3mitalia.it/futuro

