



# FUTURO™ BANDAGE DU COUDE EPICONDYLIQUE

47861-63



SOUTIEN  
MODÉRÉ



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un avant-bras ou un coude raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Silicone Rubber, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une compression immédiate  
avec des coussinets doubles pour une  
pression ciblée sur les bras douloureux.

**INDIQUÉ POUR:**  
Activités quotidiennes

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Un matériau extensible dans 4 directions maintient la coudière en place.
- 2 Design profilé pour un ajustement optimal.
- 3 La sangle enveloppante offre une compression supplémentaire.

## TAILLES:

Category Number	Size	cm
47861	S	22.9-25.4
47862	M	25.4-27.9
47863	L	27.9-30.5



Mesurez autour de l'articulation du coude.

## MODE D'EMPLOI:



Faites glisser le support au-dessus du coude.



Placez les coussinets de pression de façon à ce qu'ils reposent sur le dessus et le dessous (côtés radial et ulnaire) de l'avant-bras, juste en dessous du coude.



Entourez la sangle autour de l'avant-bras. Serrez jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour  
le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

**3M**