



FUTURO™ COMFORT KYYNÄRPÄÄTUKI PAINETTYNYILLÄ

47861-63



KESKITASON
TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: jäykän, heikon tai vahingoittuneen kyynärpään ja kyynärvarren tukeminen.

Koostumus: nailon, silikonikumi, polyesteri, elastaani.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Helpottaa käsivarsien särkyä
kahden pehmustetyynyn tuoman
kohdistetun kompression avulla.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:
arkiaskareisiin

OMINAISUUDET:

- 1 Neljään suuntaan venyvä materiaali pitää tuen paikallaan.
- 2 Viimeistely muotoilu takaa optimaalisen istuvuuden.
- 3 Käsivarren ympärille tuleva kiristysnauha antaa lisätukea.

KOKO:

Tuotekoodi	Koko	CM
47861	S	22.9-25.4
47862	M	25.4-27.9
47863	L	27.9-30.5



Kyynärnivelen ympärysmitta.

TUEN ASETTAMINEN:



Aseta tuki kyynärpäähän.



Kohdista painepehmusteet niin että ne lepäävät kyynärvarren päällä ja alapuolella juuri kyynärpään alapuolella.



Kiedo hihna kyynärvarren ympäri. Säädä nauhojen kireyttä, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M