



FUTURO™ HANDLEDSSTÖD MED FLYTTBAR SKENA

47853-55



Stabiliserar och ger stöd åt öm, svag eller skadad handled.

PERFEKT FÖR:

Stöd för enkla handledsskador som vrickningar, överansträngning och symptom på karpaltunnelsyndrom*

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Flyttbar skena för höger eller vänster hand.
- 2 Design med tre band för justerbar, individuell passform.
- 3 Skena i handflatan bidrar till stabilitet.

STORLEK:



Artikel nummer	Storlek	CM
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9

Passar både vänster och höger handled.

Avsedd användning: För att ge stöd åt stel, svag eller skadad handled.

Läkare rekommenderar ofta användning av ett stabilt handledsstöd vid behandling av karpaltunnelsyndrom och andra smärtsamma tillstånd.

Material: Uretanskum, Aluminium, Polyester, Nylon, Uretanlim.


Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.


ANVÄNDNING:



Öppna fästansordningar. Trä in handen i stödet med metallskenan positionerad längs handflatan.

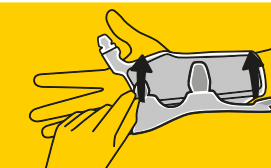

Fäst mittbandet först och sedan de två övriga banden.

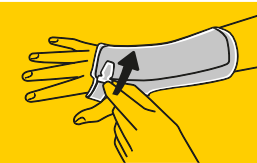

Fäst tumbandet på handens motsatta sida. Justera alla band tills stödet sitter stabilt men ändå bekvämt.



För användning på vänster hand: Tag ur skenan ur fickan. Håll i skenan och vänd handledsstödet. För in skenan i motsatt ficköppning. Följ bruksanvisningarna ovan.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

