



FUTURO™ MUÑEQUERA METACARPIANA REVERSIBLE

47853-55

 **SOPORTE
MODERADO**



**MATERIALES
TRANSPIRABLES**

Uso previsto: Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

*Los médicos suelen recomendar el uso de una muñequera rígida para tratar el síndrome del túnel carpiano y otros trastornos dolorosos de la muñeca.

Composición: Urethane Foam, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethane Adhesive.

If discomfort or pain results, persists or increases, discontinue use and consult a physician.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

**Estabiliza y proporciona sujeción
a muñecas doloridas, débiles o
lesionadas.**

IDEAL PARA:

Proporciona sujeción en caso de lesiones comunes como esguinces, torceduras y síntomas del síndrome del túnel carpiano*

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Férula reversible para la mano derecha o para la mano izquierda.
- 2 Diseño tipo manga con tres correas de sujeción para un ajuste personalizado.
- 3 Estabilizador palmar que proporciona una estabilización moderada.

TOMAR LA MEDIDA:



CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
208960.0	S	12.7-15.9
208549.7	M	15.9-19.0
208548.0	L	19.0-22.9

Adecuada para la muñeca izquierda o para la derecha.

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abir los cierres. Introducir la mano en el soporte colocando la férula metálica a lo largo de la palma.



Cerrar la correa central y a continuación las correas contiguas.



Sujetar la correa del pulgar en el lado opuesto de la mano. Ajustar todas las correas hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.



Para la mano izquierda: Sacar la férula del bolsillo. Sujetar la férula firmemente, girar el soporte e introducir la férula en la abertura del bolsillo opuesto. Introducir el extremo de la férula en el bolsillo. Seguir las instrucciones del fabricante.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

3M