



# FUTURO™ SOPORTE REVERSÍVEL PARA O PULSO

47853-55

 **SOPORTE  
MODERADO**



**MATERIAIS  
RESPIRÁVEIS**

Utilização prevista: Proporcionar suporte de pulso rígido, fraco ou lesionado.

\*Os médicos recomendam frequentemente o uso de um suporte de pulso rígido durante o tratamento da Síndrome do Canal Cárpico e noutros quadros dolorosos dos pulsos.

Composição: Urethane Foam, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethane Adhesive.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

**Estabiliza e suporta o pulso dorido,  
fraco ou lesionado.**

## IDEAL PARA:

Suporte para lesões comuns, como entorses, distensões e sintomas da Síndrome do Canal Cárpico\*

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Tala reversível para a mão esquerda ou direita.
- 2 Design da manga com três faixas para ajuste regulável e personalizado.
- 3 O estabilizador palmar ajuda a proporcionar estabilidade moderada.

## TOMAR LA MEDIDA:



C.N.P	Size	CM
7948067	S	12.7-15.9
7948075	M	15.9-19.0
7948083	L	19.0-22.9

Pode ser usado no pulso esquerdo ou direito.

## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abra os fechos. Introduza a mão na braçadeira com a tala metálica posicionada ao longo da palma da mão.



Feche a faixa central e, em seguida, as faixas adjacentes.



Aplique a faixa do polegar ao lado oposto da mão. Ajuste todas as faixas até o ajuste ser firme e confortável.



Para utilização na Mão Esquerda: Puxe a tala para fora da bolsa. Segure firmemente na tala, rode a braçadeira e deslize a tala para a abertura oposta da bolsa. Empurre a extremidade da tala para dentro da bolsa. Siga as instruções de uso acima.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

**3M**