



FUTURO™ TUTORE REVERSIBILE PER POLSO

47853-55

 **SUPPORTO
MODERATO**



**MATERIALE
TRASPIRANTE**

Destinazione d'uso: Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.

*I medici raccomandano spesso l'uso di un tutore rigido per il polso durante la gestione della sindrome del tunnel carpale e di altre patologie dolorose del polso.

Composition: Urethane Foam, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethane Adhesive.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

**Stabilizza e supporta polsi deboli,
dolenti o lesionati.**

IDEALE PER:

Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni, contratture e sintomi della sindrome del tunnel carpale.*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Tutore reversibile per la mano destra o sinistra.
- 2 Tutore con tre chiusure a strappo per una vestibilità regolabile e personalizzata.
- 3 Lo stabilizzatore palmare contribuisce a fornire una stabilità moderata.

TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9



Può essere indossata sul polso sinistro o destro.


COME INDOSSARLO:



Aprire le chiusure. Far scorrere la mano nel tutore con una stecca di metallo posizionata sul palmo della mano.



Chiudere la fascia centrale, quindi le fasce adiacenti.

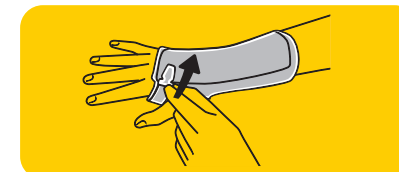

Applicare la fascia del pollice sul lato opposto della mano. Regolare tutte le fasce per ottenere una vestibilità salda, ma comoda.



Per l'uso con la mano sinistra: far scorrere la stecca dalla tasca. Tenere ferma la stecca, ruotare il tutore e far scorrere la stecca nell'apertura della tasca opposta. Infilare interamente l'estremità della stecca nella tasca. Seguire le istruzioni riportate qui sopra per indossare il prodotto.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Pogliano MI
www.3mitalia.it/futuro

3M