



FUTURO™ ATTELLE DE POIGNET RÉVERSIBLE

47853-55



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux
Composition: Urethane Foam, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethane Adhesive.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

**Stabilise et soutient un poignet
endolori, faible ou blessé.**

INDIQUÉ POUR:

Soutien aux blessures courantes telles que les foulures, les entorses ou les symptômes du syndrome du canal carpien.*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Attelle réversible pour main gauche ou droite.
- 2 Fourreau avec trois sangles pour une coupe personnalisée ajustable.
- 3 Le stabilisateur de paume aide à fournir une stabilité modérée.

TAILLES:

Category Number	Size	cm
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9



Convient au poignet gauche ou droit.

MODE D'EMPLOI:



Ouvrez les fixations. Faites glisser la main dans l'orthèse avec la baleine métallique placée le long de la paume de la main.



Fermez la sangle centrale, puis les sangles adjacentes.



Appliquez la sangle du pouce sur le côté opposé de la main. Ajustez toutes les sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



Pour une utilisation avec la main gauche : Faites glisser la baleine hors de la pochette. Maintenez la baleine stable, faites pivoter l'orthèse et glissez l'attelle la baleine dans l'ouverture du côté opposé. Rentrez l'extrémité de la baleine dans la pochette. Suivez les instructions d'utilisation ci-dessus.

3M

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise