



FUTURO™ KÄÄNNETTÄVÄ RANNETUKI LASTALLA

47853-55

**KESKITASON
TUKI**



**HENGITTÄVÄ
MATERIAALI**

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen ranteen tukeminen.

*Lääkärit suosittelevat usein jäykän rannetuen käyttöä rannekanavaoireyhtymän ja muiden ranteen kiputilojen hallintaan.

Koostumus: uretaanivahto, alumiini, polyesteri, naiton, uretaaniliima.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Stabiloi ja tukee kipeää, heikkoa tai vahingoittunutta rannetta.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Tukemaan lieviä vaurioita, kuten venähdyksiä ja rannekanavaoireyhtymän* oireita

OMINAISUUDET:

- 1 Käännettävä lasta oikealle tai vasemmalle kädelle.
- 2 Kolmella hihnalla varustettu hihamainen muotoilu on helppo säätää sopivaksi.
- 3 Kämmenen vakauttaja antaa tasaisen tuen.

KOKO:

Tuotekoodi	Koko	CM
47853	S	12.7-15.9
47854	M	15.9-19.0
47855	L	19.0-22.9



Sopii oikeaan ja vasempaan ranteeseen.

TUEN ASETTAMINEN:



Avaa kiinnittimet. Aseta käsi tukeen niin että metallilasta on kämmenen suuntaisesti.



Sulje ensin keskimäinen hihna ja sitten muut hihnat.



Kiinnitä peukalohihna käden toiselle puolelle. Säädä kaikkia hihnoja, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.



Käyttö vasemmassa kädessä: Liu'uta lasta pois taskusta. Pidä lastaa vakaasti kädessä, käännä tukea ja liu'uta lasta päinvastaiseen taskuun. Työnnä lastan pää taskuun. Noudata yllä olevia käyttöohjeita.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M