



FUTURO™ VENDBAR HÅNDESSKINNE

47853-55

 MODERAT
STØTTE



ÅNDBARE
MATERIALER

Stabiliserer og støtter ømme, svage eller skadede håndled.

VELEGNET TIL:

Giver støtte til almindelige skader som forstuvning, overbelastning og symptomer på karpaltunnelsyndrom*

NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Vendbar håndledsskinne til både højre og venstre hånd.
- 2 Manchetdesign med tre stropper for justerbar, brugertilpasset pasform.
- 3 Håndfladestabilisatoren giver moderat stabilitet.

STØRRELSESVALG:

Varenr	Størrelse	CM
213019	S	12.7-15.9
213020	M	15.9-19.0
213021	L	19.0-22.9



Kan bruges på både venstre og højre håndled.

SÅDAN BRUGES DEN:



Åbn lukningerne. Før hånden ind i håndledsskinne med metalskinne placeret langs håndfladen.



Luk den midterste strop og derefter de tilstødende stropper.



Sæt tommelfingerstroppen på håndens modsatte side. Juster alle stropper, indtil den sidder fast, men alligevel føles behagelig.



Til anvendelse på venstre hånd: Skub metalskinne ud af lommen. Hold metalskinne fast, drej håndledsskinne rundt, og skub metalskinne ind i den modsatte lommeåbning. Stik enden af metalskinne ind i lommen. Følg brugsvejledningen ovenfor.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

3M

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, svage eller skadede håndled.

*Læger anbefaler ofte at bruge en stiv håndledsskinne ved behandling af karpaltunnelsyndrom og andre smertefulde lidelser i håndledet.

Materialesammensætning: Urethanskum, Aluminium, Polyester, Nylon, Urethan klæbestof.

Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.