



# FUTURO™ ATTELLE DE POIGNET RÉVERSIBLE

47853-55

**SOUTIEN  
MODÉRÉ**



**MATÉRIAU  
RESPIRANT**

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

\*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux  
Composition: Mousse Polyuréthane, Aluminium, Polyester, Nylon,  
Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.  
3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

**Stabilise et soutient un poignet  
endolori, faible ou blessé.**

## INDIQUÉ POUR:

Soutien aux blessures courantes telles que les foulures, les entorses ou les symptômes du syndrome du canal carpien.\*

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Attelle réversible pour main gauche ou droite.
- 2 Fourreau avec trois sangles pour une coupe personnalisée ajustable.
- 3 Le stabilisateur de paume aide à fournir une stabilité modérée.

## TAILLES:

Référence	CNK	Taille	CM
47853	2251486	S	12.7-15.9
47854	2251478	M	15.9-19.0
47855	2251460	L	19.0-22.9



Convient au poignet gauche ou droit.

## MODE D'EMPLOI:



Ouvrez les fixations. Faites glisser la main dans l'orthèse avec la baleine métallique placée le long de la paume de la main.



Fermez la sangle centrale, puis les sangles adjacentes.



Appliquez la sangle du pouce sur le côté opposé de la main. Ajustez toutes les sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



Pour une utilisation avec la main gauche : Faites glisser la baleine hors de la pochette. Maintenez la baleine stable, faites pivoter l'orthèse et glissez l'attelle la baleine dans l'ouverture du côté opposé. Rentrez l'extrémité de la baleine dans la pochette. Suivez les instructions d'utilisation ci-dessus.

3M Belgium bvba/sprl  
Dép. Consumer Health Care  
[www.3m.be/futuro-fr](http://www.3m.be/futuro-fr)

**3M**