



FUTURO™ PERFORMANCE KNESTABILISATOR

47550

 MODERAT
STØTTE



Bidrar til å stabilisere skadet eller ustabilt kne under aktivitet.

IDEELL FOR:

Gir støtte ved vanlige skader som forstuinger og forstrekninger

NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Doble stabilisatorer for midt- og sidestøtte.
 - 2 Justerbare stropper gir tilpasningsmuligheter.
 - 3 Hakelukning med refleks for økt synlighet.
- Slitesterk neoprenblanding for sterk støtte, lindrende varme og komfort.

STØRRELSER:

Category Number	CM
47550	33.0-44.4



VED BRUK:



Legg stabilisator over kneet, glatt side mot huden og med en stropp på utsiden av leggen. Legg det runde hullet over kneskålen. Fest den midterste stroppen under kneet og fest borrelåsen til stabilisatoren.



Plasser kneet naturlig til bandasjens utforming. Fest hver av de to gjenværende stroppene utenfor under kneet og fest lukningen til stabilisatoren. Juster alle stroppene til det føles stramt, men komfortabelt.

Tiltenkt bruk: Støtte for stivt, svakt eller skadet kne.

FORSIKTIG: Noen personer kan være følsomme for neopren eller blandinger som inneholder neopren. Hvis du får utslett, stopp bruken og oppsøk lege.

Composition: Neoprene, Steel, Nylon, Polyester.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

3M