



FUTURO™ STABILIZZATORE REGOLABILE PER GINOCCHIO

47550



Aiuta a stabilizzare il ginocchio lesionato o instabile durante le attività.

IDEALE PER:

Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni e contratture

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Stabilizzatori doppi per il supporto mediale e laterale.
 - 2 Cinghie regolabili per un adattamento personalizzato.
 - 3 Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.
- La miscela di neoprene durevole offre un supporto forte, calore che dà sollievo e comfort.

TAGLIA:

Codice Prodotto	CM
47550	33.0-44.4



COME INDOSSARLO:



Appoggiare il tutore sul ginocchio, con la parte liscia rivolta verso la pelle e la fascia singola che si apre verso l'esterno della gamba. Posizionare il foro circolare in corrispondenza della rotula. Avvolgere la fascia mediana passandola sotto al ginocchio e fissare la chiusura a gancio sul tutore.



Posizionare il ginocchio nella tasca di supporto. Avvolgere ciascuna delle due fasce rimanenti passandole sotto al ginocchio e fissare le chiusure sul tutore. Regolare tutte le fasce per ottenere una vestibilità salda, ma comoda.

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

ATTENZIONE: Alcune persone possono essere sensibili al neoprene o alla gomma in miscela di neoprene. In caso di arrossamento interrompere l'uso e consultare un medico.

Composition: Neoprene, Steel, Nylon, Polyester.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Piofello MI
www.3mitalia.it/futuro

