



FUTURO™ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ

47550



Προσφέρει σταθεροποίηση για τραυματισμένα ή ασταθή γόνατα σε έντονη δραστηριότητα.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ:

Παροχή στήριξης σε κοινούς τραυματισμούς, όπως διαστρέμματα και θλάσεις

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

- 1 Διπλοί σταθεροποιητές, για έσω και πλευρική στήριξη.
 - 2 Ρυθμιζόμενοι ιμάντες, για προσαρμοζόμενη εφαρμογή.
 - 3 Αντανακλαστικά τελειώματα, για βέλτιστη ορατότητα.
- Ανθεκτικό μείγμα νεοπρενίου, για ισχυρή στήριξη, καταπραϊντική θερμότητα και άνεση.

ΜΕΓΕΘΗ:

Κωδικός Αναφοράς	Εκατοστά
47550	33.0-44.4



ΠΩΣ ΝΑ ΤΗ ΦΟΡΕΣΕΤΕ:



Τοποθετήστε τον νάρθηκα πάνω στο γόνατο, με την μαλακή πλευρά να ακουμπάει στο δέρμα και τον μονό ιμάντα από την εξωτερική πλευρά του ποδιού. Τοποθετήστε το στρογγυλό άνοιγμα πάνω από την επιγονατίδα. Τυλίξτε τον μεσαίο ιμάντα κάτω από το γόνατο και στερεώστε το συνδετικό του ιμάντα πάνω στον νάρθηκα.



Τοποθετήστε το γόνατο μέσα στη θήκη στήριξης. Τυλίξτε τους δύο εναπομείναντες εξωτερικούς ιμάντες κάτω από το γόνατο και στερεώστε τα συνδετικά πάνω στον νάρθηκα. Ρυθμίστε όλους τους ιμάντες μέχρι η εφαρμογή να είναι σταθερή, αλλά και άνετη.

Προβλεπόμενη χρήση: Παρέχει στήριξη σε δύσκαμπτα, αδύναμα ή τραυματισμένα γόνατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα άτομα ίσως έχουν ευαισθησία στο νεοπρένιο ή στα ελαστικά υλικά από μείγμα νεοπρενίου. Εάν εμφανιστεί εξάνθημα, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε ιατρό.

Σύνθεση: Neoprene, Steel, Nylon, Polyester.

Αν προκληθούν, επιμένουν ή επιδεινωθούν οι ενοχλήσεις ή ο πόνος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

Τα 3M και FUTURO είναι εμπορικά σήματα της 3M.

3M Ελλάς ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 20
15125, Μαρούσι, Αθήνα
www.3M.gr

