



# FUTURO™ GENOUILLÈRE STABILISARICE AJUSTABLE

47550



Apporte une stabilisation à un genou blessé ou instable, tout en étant actif.

## INDIQUÉ POUR:

Fournir un soutien aux blessures courantes telles que les entorses et les foulures

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Double stabilisateur pour soutien médial et soutien latéral.
  - 2 Sangles réglables pour un ajustement sur mesure.
  - 3 Languettes d'attache réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
- Mélange de néoprène durable pour soutien ferme, chaleur apaisante et confort.

## TAILLES:

Category Number	cm
47550	33.0-44.4



## MODE D'EMPLOI:



Posez le stabilisateur sur le genou, côté lisse contre la peau, et avec une seule sangle à l'extérieur de la jambe. Placez l'orifice rond au-dessus de la rotule. Entourez la sangle centrale sous le genou et fixez la fermeture à crochets au stabilisateur.



Placez le genou dans le support. Enroulez chacune des deux sangles et fixez les fermetures au stabilisateur. Réglez toutes les sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

**AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc.**

**En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.**

Composition: Neoprene, Steel, Nylon, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

